

# Biogel® Tech Handskar

Biogel® Tech-handskarna är utformade för användning i renrumsmiljöer. Den värmeförseglade förpackningen med dubbla påsar uppfyller hygienrutinerna och är enkel att hantera.

## Så här packar du upp Biogel Tech-handskarna samtidigt som du håller dem rena

1



Använd ett plastförkläde för att skydda kläderna mot smuts från kartongen. Annars kan smuts överföras till plastpåsar inuti när kartongen öppnas och packas upp.



Varje transportkartong innehåller 200 par handskar. Vart och ett av de fyra facken i transportkartongen har 2x25 par handskar förpackade i värmeförseglade dubbla plastpåsar\*.

2



Se till att händerna är desinficerade innan du tömmer plastpåsar. Var försiktig så att du inte vidrör plastpåsar med smutsiga händer.



Placera påsarna på en ren och desinficerad yta.

\*160 par i storlek 9.

3




För att ta bort den yttre plastpåsen rekommenderar vi att du använder en sax. Börja med kanterna för att minimera risken för kontaminering. Se sedan till att vika plasten utåt utan att vidröra den inre plastpåsen.

4



Desinficera händerna innan du placerar de 25 paren (fortfarande i plastpåsen) på en annan ren, desinficerad yta.

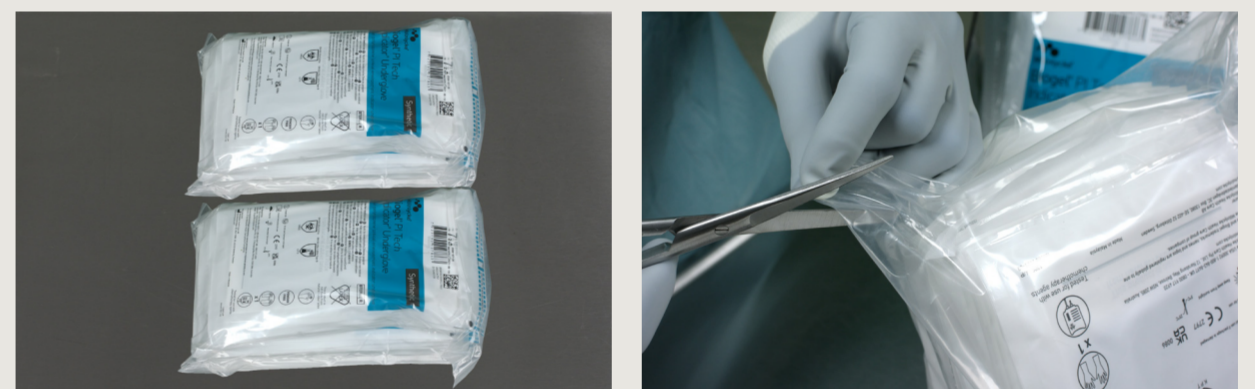

Handskena kan förvaras i den inre plastpåsen eller packas upp och läggas i en förvaringslåda. Sätt på dig lämpliga skyddskläder och sterila handskar innan du packar upp de sterila barriärerna från den inre plastpåsen. Användning av en sax kan vara praktisk för att klippa botten på plastpåsen och underlätta packningen av förvaringslådan.



Handskena kan nu förvaras närmare platsen där de ska användas.

### Biogel Tech-sortimentet – Upptäck en högre säkerhetsnivå

Varje enskilt Biogel Tech-handskpar är förpackat i en högkvalitativ innerförpackning av polyeten för att partikelantalet ska minimeras. Förpackningen är utformad så att den förblir öppen när den vecklas ut för att aseptisk påtagning av handskena ska säkerställas. Paret förpackas sedan i en steril barriär av laminerad polyester och polyeten med låg densitet.

Läs mer på [www.molnlycke.se](http://www.molnlycke.se)

Mölnlycke Health Care AB, P.O. Box 13080, Gamlestadsvägen 3 C, SE-402 52 Göteborg. Tel + 46 31 722 30 00  
Varumärkena, namnen och logotyperna Mölnlycke och Biogel är globalt registrerade av ett eller flera företag i Mölnlycke Health Care Group. ©2022 Mölnlycke Health Care AB. Med ensamrätt. SESU0932204



**Biogel® Tech**  
Hands Deserve Better™

**Mölnlycke®**