

Mextra® Superabsorbent

Superabsorberande förband med vätskeavvisande barriär


- Hög vätskehantering (retention¹ och absorption²)
- Mjukt och bekvämt¹
- Skyddar den omkringliggande huden¹

Vätskeavvisande barriär

- Förhindrar extern genomträngning av vätska samt skyddar mot kontamination¹

Spridningsskikt

- Fördelar sårvätskan jämnt i förbandet till absorptionslagret¹

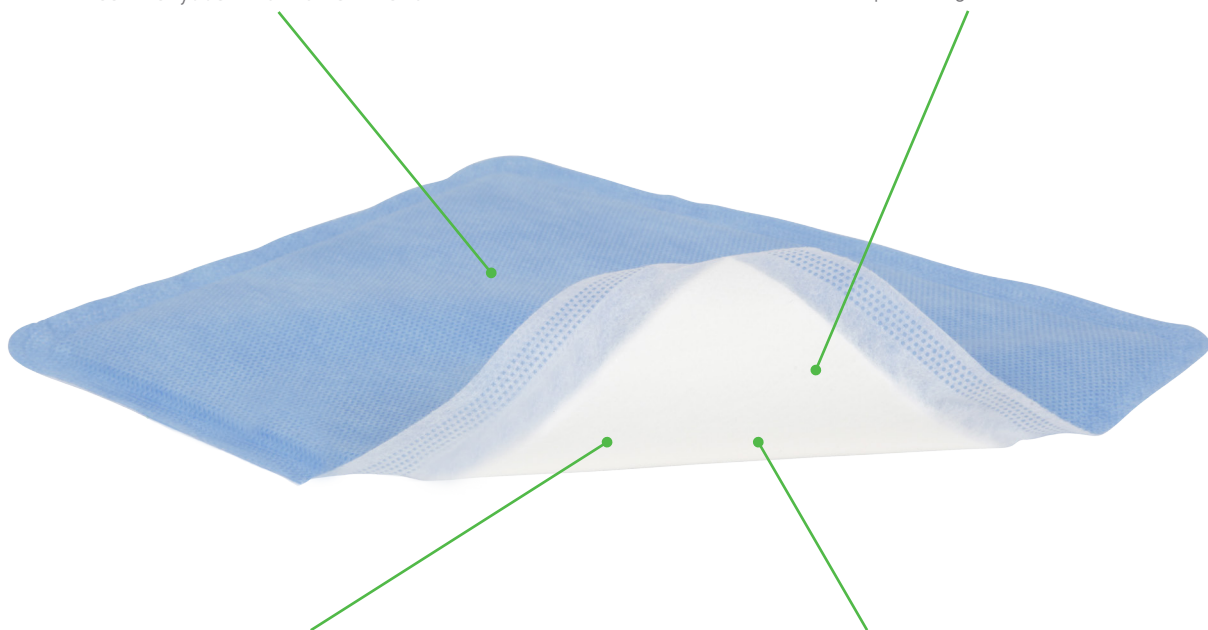

Sårkontaktlager

- Transporterar vätska till absorptionslagret¹
- Reducerar risken för maceration¹
- Skyddar den omkringliggande huden¹


Absorptionslager med superabsorbenter

- Hanterar måttligt till rikligt vätskande sår¹
- Utmärkt vätskehantering (absorption och retention)^{1,2}


Så här används Mextra® Superabsorbent



1. Rengör såret och välj en lämplig storlek av Mextra Superabsorbent.

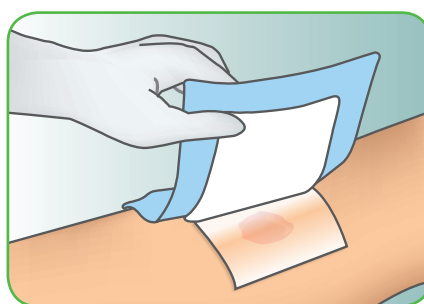

2. Applicera Mextra Superabsorbent direkt på sårområdet med den vita sidan av förbandet mot såret. För bästa resultat ska dynan överlappa den torra omkringliggande huden med minst 2 cm. Mepitel® eller Mepilex® Transfer kan också användas tillsammans med Mextra Superabsorbent.

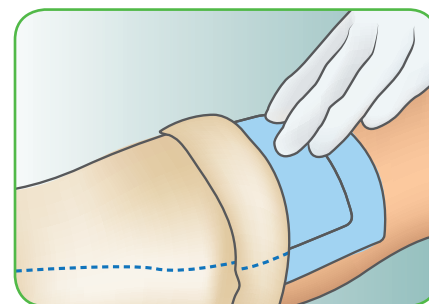

3. Fixera Mextra Superabsorbent med en lämplig fixeringsprodukt t.ex. Tubifast® eller fixeringstejp. Förbandet kan vid behov även användas under kompression.

Fördelar med Mextra Superabsorbent

- Minskar risken för läckage och maceration¹
- Minskar behovet av täta förbandsbyten¹
- Minskar behandlingskostnaderna¹
- Behåller form och struktur utan att bli obekvämt och klumpigt vid absorption¹
- Yttre lagret förblir torrt¹
- Bekvämt för patienten att använda¹
- Fungerar under kompression

Användningsområden

Mextra Superabsorbent är utvecklat för användning på måttligt till rikligt vätskande sår. Förbandet absorberar sårsekret effektivt och behåller vätskan i kärnan, vilket minskar risken för maceration. Den vätskeavvisande baksidesbarriären förhindrar läckage samt skyddar mot extern genomträngning av vätska.

Bytesfrekvens

Inspektera såret och Mextra Superabsorbenter regelbundet. Mextra Superabsorbent kan sitta kvar i flera dagar (max sju dagar), beroende på sårets tillstånd eller enligt rekommendation från vårdpersonal.



Mextra Superabsorbent (Sterila enstycksförpackade)

Art. nr	Storlek cm	Avd fp	Tansp fp
610700	10 x 10	10	50
610710	10 x 15	10	40
610720	10 x 20	10	90
610730	15 x 20	10	40
610740	20 x 25	10	40
610750	20 x 30	10	50
610760	20 x 40	10	50

REFERENSER: 1. Tickle, J., Fletcher, J. Mextra Superabsorbent made easy. Wounds UK 2012; 8(4): 1-4. 2. Mölnlycke Health Care Laboratory report no: PD-522474, 2016 (unpublished). 3. Wiegand, C., Hipler, U.C. In vitro evaluation of MMP binding capacity of a superabsorbent dressing and the reduction of collagenase activity. Poster presentation at European Wound Management Association conference, Copenhagen, Denmark, 2013. 4. Eming, S., Smola, H., Hartmann, B., Malchau, G., Wegner, R., Krieg, T., Smola-Hess, S. The inhibition of matrix metalloproteinase activity in chronic wounds by a polyacrylate superabsorber. Biomaterials 2008; 29(19): 2932-2940

Läs mer på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, Gamlestadsvägen 3c, 402 52 Göteborg, Sverige. Telefon +46 31 722 30 00. Mölnlycke®, Mepilex®, Mepitel®, Mepiform®, Exufiber®, Mepore®, Mextra®, Tubifast® 2-Way Stretch™, Melgisorb® och Safetac® är varumärken, namn och logotyper som globalt är registrerade av Mölnlycke Health Care AB eller annan juridisk person inom samma koncern som Mölnlycke Health Care AB. Copyright© 2017 Mölnlycke Health Care.


Mölnlycke®