



Absorberande förband med vätskeavstötande barriär

Mesorb är ett mjukt högabsorberande förband som kan absorbera stora mängder sårsekret. Den vätskeavstötande baksidan med de omvikta kanterna skyddar kläder och sängkläder från läckage.


Andningsbar
ovansida för komfort.

Låg vidhäftning mot såret
för komfort.


Högabsorberande cellulosamassa
för hantering av sårsekret.

Vätskeavvisande barriär som förhindrar
läckage och kontamination.


Skydd på sidorna för
att förhindra läckage.

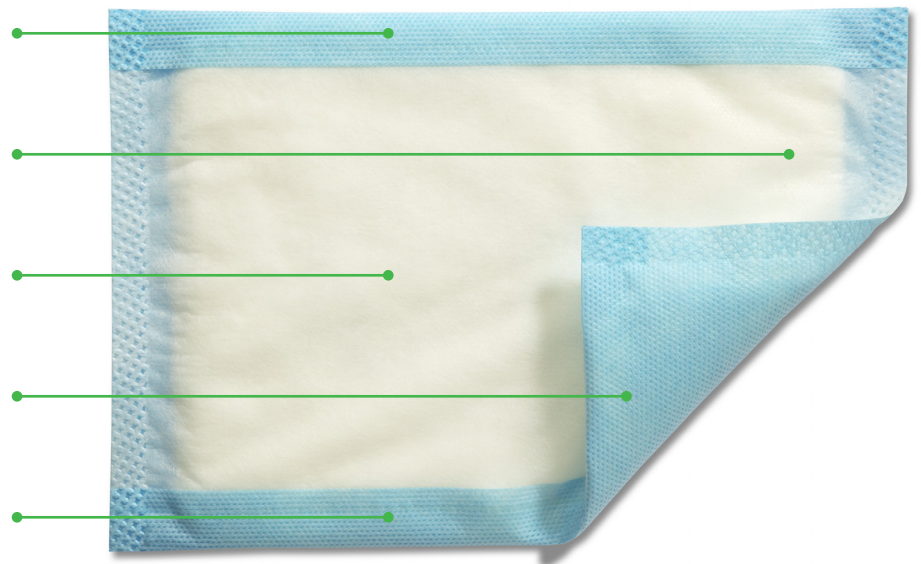


Så här används Mesorb®

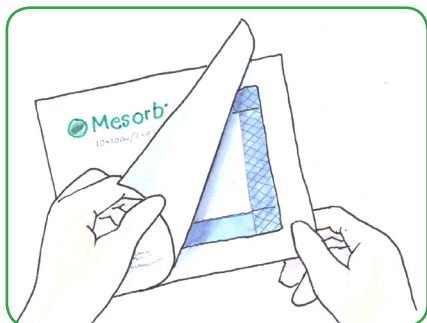

Öppna förpackningen och ta ur förbandet. Rengör såret och torka omkringliggande hud.

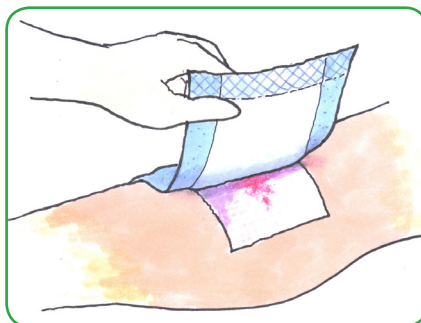

Applicera Mesorb direkt på såret eller över det valda primära förbandet, med en överlappning på åtminstone 1 cm på den omkringliggande huden.

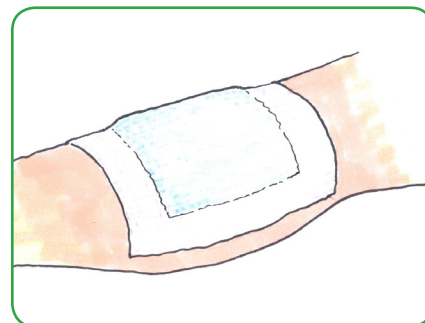

Fixera med en lämplig fixeringsprodukt, t.ex. Mefix®, Mepore® Film eller Tubifast™.

Så här fungerar Mesorb

Sårsekret absorberas och suggs upp av Mesorb med hjälp av ytskiktet och spridningsskiktet. Den högabsorberande kärnan absorberar sårsekret samtidigt som den skyddar och ventilerar. Den vätskeavstötande baksidan förhindrar extern kontamination och skyddar kläder och sängkläder mot läckage och sårsekret. Baksidan täcker förbandets sidor och förhindrar läckage från sidorna.

Fördelar med Mesorb

- Högabsorberande
- Fungerar som polstring
- Andningsbar
- Kostnadseffektiv
- Den unika vätskeavstötande barriären minskar antalet förbandsbyten och skyddar kläder och sängkläder

Bytesfrekvens

Mesorb kan sitta kvar i flera dagar, beroende på sårets och hudens tillstånd eller enligt rekommendation från vårdpersonal.

Mesorb sortiment

(levereras sterila, enstycksförpackade)

Art nr	Storlek cm	Avd fp	Transp fp
677001	10 x 13	50	400
677080	10 x 10	10	80
677201	13 x 15	50	300
677280	10 x 15	10	80
677401	10 x 23	50	300
677480	10 x 20	10	80
677601	15 x 23	50	300
677680	15 x 20	10	60
677701	23 x 25	30	120
677780	20 x 25	10	70
677801	23 x 30	30	120
677880	20 x 30	10	50

Användningsområden

Mesorb är utvecklad för användning på måttligt till kraftigt vätskande sår. Mesorb kan användas som primärt förband (direkt på såret) eller som ytterförband, om ett högabsorberande förband krävs (t. ex. tillsammans med Mepitel® eller Mepilex® Transfer).

Observera

Mesorb ska inte användas på infekterade sår utan att lämplig infektionsbehandling inletts.



Mer information på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB
Box 13080, 402 52 Göteborg
Telefon: 031-722 30 00
www.molnlycke.se

Mölnlycke-symbolen och textbilden är registrerade varumärken hos Mölnlycke Health Care AB.w